



לבחור נכון!

באיכות חיים, שליטה וביטחון

## מוצרי סטומה לפגים, תינוקות וילדים

מגוון מוצרים ביחידה אחת ובשתי יחידות, מגיל פגות ועד בגרות



## תשובות לשאלות נפוצות



**במה להשתמש כאשר רוצים לנקות את העור מסביב לסטומה?**

**תשובה:** יש לנקות את העור סביב הסטומה עם סבון ומים. שמוש במגבונים לחים או בקרם ימנעו הדבקה יעילה של מגן העור. אין לשפשף את הסטומה ואין צורך בפדים סטריליים.

**אם יש ריח לא נעים, מה לעשות?**

**תשובה:** אם יש ריח לא נעים, כנראה שיש דליפה כלשהיא מהשקית או מתחת למגן העור, יש להחליפם.

**האם ניתן לתת לתינוק תרופות?**

**תשובה:** במידה והרופא המליץ על מתן תרופות אין כל מניעה. יש לעדכן גורם מקצועי רופא/ אחות/רוקח של התינוק עם הסטומה.

**הסטומה לפעמים משנה צבע, האם זה תקין?**

**תשובה:** הסטומה בדרך כלל אדומה ולחה, לעיתים צבע הסטומה משתנה, אם התינוק בוכה, הסטומה עשויה להשתנות לצבע בהיר יותר. במידה ואת/ה מבחינה/ה בשינוי צבע/צורה שאינם חוזרים למצב המוכר לך, פני/ה לגורם מקצועי רופא/אחות.

**הילד שלי מושך את השקית החוצה. מה לעשות?**

**תשובה:** תינוקות בדר"כ סקרנים לגבי גופם ולגבי הסביבה. מאוד יעזור להלביש את התינוק בחליפה בעלת חלק אחיד.

**השקית של התינוק מתנתקת לעיתים קרובות. מה לעשות?**

**תשובה:** ככל שהתינוק הופך ליותר פעיל, מופעל יותר לחץ על איזור ההתאמה בין השקית למגן העור. זה אמנם מתסכל, אולם בהחלט נורמלי. כשהתינוק מתחיל לזחול, למשוך וללכת, חגורה תוכל מאוד לעזור.



מרכז ידע  
והינך עולמי



תאגיד  
אמריקני



חדישה ומתקדמת  
טכנולוגיה



מבטת צפה  
בלעדי



אחות סטומה  
אן-ליין



שירות ייעוץ  
24/7



## מוצרי סטומה לפגים, תינוקות וילדים



מידע להורים

אם לילדך סטומה, אין ספק שאושרך יהיה מהול בדאגה לצרכיו המיוחדים. מלבד ללמוד להבין את מצבו הבריאותי, חשוב ללמוד כיצד להסתדר עם ציוד הסטומה. אנו ניתן מעט טיפים חשובים לטיפול בתינוק ובילד, וכן ננסה לענות על מספר שאלות שעולות לעיתים קרובות. רצוי להוועץ בצוות מקצועי/אחות סטומה בכל מצב חריג.

**רחצה:**

ניתן לרחוץ את ילדך עם שקית או בלעדיה. מים לא פוגעים או מזיקים לסטומה. אם את/ה מחליטה/ה להוריד את השקית לפני הרחצה אל תהיה מופתעת/ת אם הסטומה תהיה פעילה בתוך האמבט. הימנע/י משימוש בסבון שומני וקרם גוף סביב הסטומה, כיוון שהם מפריעים להצמדת מגן העור לעור.

**שינה:**

מומלץ לרוקן את השקית סמוך לשעת השינה, שינה על הבטן לא פוגעת בסטומה.

**נסיעה ברכב:**

על התינוק לשבת בכיסאו המיוחד, חשוב להימנע מלשים את חגורת הבטיחות על הסטומה.

**הליכה / זחילה:**

כשילדך יתחיל לזחול/ללכת בבוא הזמן, הסטומה לא תהווה מכשול. רצוי להשתמש בחגורה כשהילד הופך להיות פעיל.

**לבוש:**

אין צורך בלבוש מיוחד, חשוב לבחור ביגוד שיהיה מספיק רחב ונוח שלא ילחץ על הסטומה. ויאפשר לשקית להתמלא.

**עדיף בגד בעל יחידה אחת:**



תינוק המחולת בחיתולים, שקית איסוף הפרשות תהיה בתוך החיתול או מחוצה לו על פי נוחיות הורים.

**דיאטה ותזונה:**

להנקה יתרונות רבים לאם ולתינוק. מאכלים חדשים יכולים להתווסף לדיאטת התינוק בהמלצת רופא. מאכל חדש עשוי לשנות את מראה הצואה וצבעה ולגרום להצטברות גזים (יראה בשקית שתתנפח). שים/י לב לתגובת התינוק למאכל חדש, אם המאכל גורם לבעיה עם היציאה, התייעץ/י עם הרופא. גזים במערכת העיכול קיימים אצל כל בני האדם, שכיח במיוחד כשיש קלוסטומיה, הסיבות הם בליעת אויר ביניקה, מאכלים גורמי גזים ומשקאות מוגזים.

# מוצרי סטומה לפגים, תינוקות וילדים

מגוון מוצרים ביחידה אחת ובשתי יחידות, מגיל פגות ועד בגרות.


# מוצרי סטומה לפגים, תינוקות וילדים

לבטיחות, נוחות, קלות השימוש ודיסקרטיות.



## מגיני עור

- כל מגיני העור הינם ידידותיים לעור, דקים, גמישים ומאפשרים הדבקה יעילה.
- מגיני העור מותאמים לעור רגיש, עמידים מאוד ומאפשרים החלפות מרובות.
- רכיבי מגן העור מכילים אלסטומר, הידרוקולואיד וסיבי כותנה המגבירים את חוזר ושלמות המוצר.

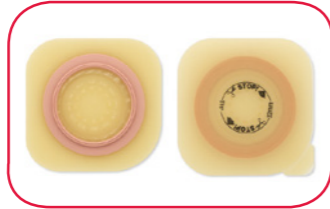

## סגירת לוק & רול

- סגירה הרמטית גם כאשר אזור הסגירה לח ורטוב.
- פסי סגירה קשיחים המאפשרים ריקון השקית בקלות.



## טבעת צפה ונעילה מרכזית

- מאפשרת הצמדת השקית למגן (בסיס) בבטחון וללא הפעלת לחץ על הבטן.
- יעיל לאחר ניתוח כשהאזור רגיש וכואב.
- נעילה מרכזית בין טבעת המגן והשקית - להקניית בטחון בסגירה.



## מגיני עור נטולי נקב

- מאפשרת יצירת פתחים לסטומה אחת או יותר, עגולה או אובלית.
- קיים בכל המגנים הן ביחידה אחת והן ב-2 יחידות.



## ילדים בוגרים

מק"ט 3799 + מק"ט 3761

- שקית פתוחה בשתי יחידות המותאמת לתינוקות וילדים פעילים (3799).
- מגן עור רך וגמיש, נטול מרכזי הניתן לגזירה עד 32 מ"מ (3761).
- פילטר סופח גזים וריחות.
- סגירת לוק & רול המקנה בטחון, ונוחות בריקון השקית (3799).



## ילדים

מק"ט 3795

- שקית פתוחה ביחידה אחת מותאמת לילדים.
- מגן עור רך וגמיש, נטול נקב מרכזי הניתן לגזירה עד 50 מ"מ.



## פעוטות

מק"ט 3796

- ציוד ביחידה אחת המותאם לעור עדין של הפעוטות.
- מגן עור רך וגמיש, נטול נקב מרכזי הניתן לגזירה עד 38 מ"מ.
- סגירת לוק & רול המקנה בטחון ונוחות בריקון השקית.



## פגים וילודים

מק"ט 3778

- ציוד המותאם לפגים ותינוקות.
- שקית שתן עם ברז היכולה להפוך לשקית פתוחה.
- מגן עור רך וגמיש, נטול נקב מרכזי הניתן לגזירה עד 35x22 מ"מ.

## פגים וילודים

מק"ט 3777

- ציוד המותאם לפגים ותינוקות.
- שקית סגורה היכולה להפוך לשקית פתוחה.
- מגן עור רך וגמיש נטול נקב הניתן לגזירה עד 15 מ"מ.

## עזרים נלווים

<p>קרם הגנה על העור מק"ט 7220</p>	<p>טבעת אטימה להגנת העור מק"ט 7805</p>	<p>חגורה לילדים פעילים מק"ט 3774</p>	<p>מגבונים להגנה על העור ללא אלכוהול מק"ט 7917</p>	<p>ספריי מחזק דבק מק"ט 7730</p>	<p>ספריי מסיר דבק מק"ט 7731</p>	<p>אבקה לטיפול בעור מק"ט 7906</p>
---------------------------------------	--	--	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

